

# ARCO DE ÖSTBY

## ÖSTBY RUBBER DAM FRAME

Arco para isolamento absoluto

Frame for absolute isolation | Arco para aislamiento absoluto

1 unidade  
unit



Esterilizável em | Sterilizable in | Esterilizable en

**AUTOCLAVE**



**ADVERTÊNCIA: NÃO PODE SER ESTERILIZADO EM ESTUFA**

**WARNING: CANNOT BE STERILIZED IN DRY HEAT**

**ADVERTENCIA: NO DEBE SER ESTERILIZADO EN ESTUFA**

**REF** 350

ANVISA: 10349450022



LEIA AS INSTRUÇÕES  
READ INSTRUCTIONS  
VEA LAS INSTRUCCIONES

**INSTRUÇÕES DE USO:** a) Apoie o Lençol de Borracha (HEVEA ANGELUS®) nas retenções do arco. b) Leve o conjunto arco-dique de borracha à boca para isolar o campo operatório. c) Continue com o isolamento absoluto.

**DIRECTIONS FOR USE:** a) Attach the Rubber Dam Sheet (HEVEA ANGELUS®) to projections of frame. b) Take the rubber dam and frame to mouth to isolate operating field. c) Proceed with the next steps of rubber dam isolation.

**INSTRUCCIONES DE USO:** a) Fije el Dique de Goma (HEVEA ANGELUS®) en las puntas del arco. b) Lleve el dique de goma con el arco en la boca para aislar el campo operatorio. c) Continue con los pasos del aislamiento absoluto.

**Responsável técnico | Technical contact | Responsable técnico:**

Sônia M. Alcântara - CRO-PR 4536

**EC REP** EMERGO EUROPE

Molénstraat 15 - 2513 BH, The Hague  
The Netherlands



**Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A**

CNPJ 00.257.992/0001-37 - I.E. 60128439-15

Rua Waldir Landgraf, 101 - Bairro Lindóia

CEP 86031-218 - Londrina - PR - Brasil



1050350 - 0514072015

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

**CUSTOMER SERVICE | ATENCIÓN AL CONSUMIDOR**

+55 (43) 2101-3200 - 0800 727 3201 (Brasil)

sac@angelus.ind.br - www.angelus.ind.br



NÃO COLOCAR PESO SOBRE O PRODUTO DURANTE A AUTOCLAVAGEM  
DO NOT PUT WEIGHT ON THE PRODUCT WHILE AUTOCLAVING  
NO COLOCAR PESO SOBRE EL PRODUCTO DURANTE USO EN AUTOCLAVE