

## **MULTI KIT ASPIRAÇÃO CIRÚRGICO AUTOCLAVÁVEL - Bula**

PORTUGUÊS

DEFINIÇÃO: Suctor cirúrgico. INDICAÇÃO: Para sucção de sangue em procedimentos cirúrgicos odontológicos.

COMPOSIÇÃO: Polipropileno.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Esterilize em autoclave antes do uso (121°C e pressão de 1 atm por 30 minutos).
2. Adapte FLEX SUCTOR CIRÚRGICO à unidade de aspiração e selecione a ponta de acordo com o procedimento a ser realizado.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES: Não reutilizar o produto. Produto descartável após o uso. Descartar o produto caso a embalagem esteja violada.